


Hyvä Bioflex Color -piilolinssien käyttäjä,

Pidäthän huolta silmiesi terveydestä käymällä säännöllisesti optikon piilolinssitarkastuksessa. Näin varmistat käyttäväsi Sinulle sopivia piilolinsskejä oikeilla vahvuuksilla. Käythän tarkastuksessa myös, mikäli käytät ilman voimakkuuksia olevia värillisiä piilolinsskejä. Optikkosi neuvoo Sinua linssien käytössä ja antaa ohjeita linssien puhdistukseen.

Bioflex Color -piilolinssien yhtäjaksoinen käyttöaika on maksimissaan 10–12 tuntia vuorokaudessa. Noudatathän optikon antamia yksilöllisiä ohjeita. Huomioithan erityisesti, että värilliset Bioflex Color -piilolinssit eivät sovellu ympärivuorokautiseen käyttöön. Toisin sanoen, et voi nukkua linssit silmissäsi.

Bioflex Color -piilolinssien vaihtoväli on neljä viikkoa tuotteen käyttöönotosta. Linssit puhdistetaan huolellisesti jokaisen käyttökerran jälkeen ja säilytetään piilolinssikotelossa niille tarkoitettuun säilytysnesteessä. Linssit vaihdetaan uusiin ilmoitetun vaihtovälin jälkeen - käyttökertojen lukumäärästä riippumatta. Ethän ylitä linssien ohjeistettua vaihtoaikaa, vaikka ne tuntuisivatkin vielä käyttökelpoisilta. Vaihtovälin pidentäminen aiheuttaa aina tulehdusriskin.

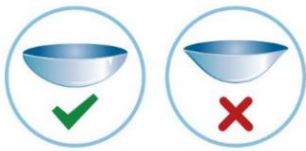

Pese kädet huolellisesti aina ennen piilolinssiin tai silmään koskemista. Varmista, että laitat piilolinssin silmään oikein päin!

Aseta linssi etusormen päähän ja katso sitä sivusuunnasta. Kun linssi kaareutuu tasaisesti keskeltä reunoille muodostaen puoliympyrän, se on oikeinpäin. Jos kaari muuttuu muotoaan reunoja kohden ja linssin reunat kääntyvät ulospäin, on linssi väärinpäin.

Laittaessasi piilolinssiä silmään, pidä silmä mahdollisimman auki ja nosta vapaalla kädellä yläluomea, siirrä katse ylös/alas ja aseta linssi silmän pinnalle. Kun linssi koskee silmäsi, odota hetki silmää auki pitäen, että se tarttuu kiinni. Liikuttele silmiäsi ja räpäytä muutaman kerran, jotta linssi asettuu paikoilleen. Jos linssi tuntuu epämukavalta, liikuta linssiä sormella silmän pinnalla ja räpyttele. Ellei tämä auta, poista linssi silmästä ja puhdista se.

Piilolinssiä poistaessa, pidä silmä mahdollisimman auki, katso ylös/alas ja vedä linssi sormella sivuun. Tartu linssiin kevyesti ja poista se silmästä. Älä purista tai taita linssiä, ettei se rikkoudu.

Puhdista piilolinssit huolellisesti jokaisen käyttökerran jälkeen. Aseta linssi kämmenelle ja kaada sen päälle "all in one" -piilolinssinestettä. Hankaa linssiä nesteessä kevyesti etusormella. Ole erityisen varovainen, jos kyntesi ovat pitkät. Huuhtele linssi vielä kertaalleen uudella nesteellä ja aseta se puhtaaseen, uutta piilolinssinestettä sisältävään piilolinssikoteloon. Muovisia piilolinssipihtejä käytettäessä, on oltava varovainen, ettei linssi vahingoitu. Vaihda piilolinssikotelo aika ajoin uuteen. Vesijohtovettä ei tule käyttää piilolinssien tai niiden kotelon huuhteluun/puhdistukseen.

Valitse kauneudenhoitotuotteista vesipohjaisia tuotteita, jotka eivät sisällä öljyä. Laita piilolinssit silmiin ennen meikkaamista ja ota ne pois ennen meikinpoistoa. Hiuslakkaa suihkutettaessa on hyvä sulkea silmät. Mikäli käytät piilolinsskejä yhdessä kostutustippojen kanssa, varmistuthan niiden soveltuvuudesta piilolinssikäyttäjille.

Ethän nuku Bioflex Color -piilolinssit silmissä! Jos niin kuitenkin käy, älä poista linsskejä heti herättyäsi. Räpyttele silmiä normaalia enemmän, odota 15-30min, kunnes kynnelneste kostuttaa linssit. Kostutustippojen tai piilolinssien hoitonesteen tiputtaminen silmään nopeuttaa kostumista. Poista linssit silmistä varovasti. Olethan yhteyttä optikkoosi, mikäli tarvitset apua linssien poistamiseksi.

Älä käytä piilolinsskejä, jos sinulla on flunssa, pahoja allergiaoireita tai jokin muu infektio. Jos linssit tuntuvat vähänkään epämukavilta tai ärsytystä aiheuttavilta – poista ne silmistä ja kysy tarvittaessa neuvoa optikoltasi.

Mahdollisessa reklamaatiotapauksessa tulee Sinun olla viipymättä yhteydessä myyjäliikkeeseen, joka toimittaa reklamoitavat linssit jakelijan kautta jatkotutkimuksiin.

Valmistaja

Star-Lens AB, Nygårdsvägen 9, SE-662 34 Åmål, Sweden | CE 0413

Jakelija

Novalens, Venekuja 1, 05720 Hyvinkää, p. 017 5522 841, novalens@novalens.fi , www.novalens.fi