

Bioflex Silicone Spheric | Toric silikonihydrogeeli -kuukausilinssit

Bioflex Silicone -piilolinssissä on hyvä tasapaino vesipitoisuuden ja hapenläpäisyn välillä. Kosteutta sisältävä linssi tuntuu miellyttävältä silmässä. Materiaalin hyvän hapenläpäisyn ansiosta, linsejä voi käyttää turvallisesti pidemmänkin käyttöpäivän ajan. Silmät pysyvät kirkkaina ja vaaleina. Bioflex Silicone piilolinssit ovat saatavilla vain kauttamme – ainoastaan näönhuollon ammattilaisille.

Tuotetiedot	Materiaali	Silicone Hydrogel / Filcon V3
	Vesipitoisuus	60 %
	DK/t	71
	Vaihtoväli	1kk
	Pakkauskoko	6 kpl
	Käsittelyväri	Kyllä – vaalea sininen
	Hoitoneste	all in one / vetyperoksidi-pohjainen

Käyttöaika

Valmistaja suosittelee Bioflex Silicone -piilolinsejä päiväkäyttöön. Todettakoon, että satunnainen nukahtaminen on turvallisempaa näiden hyvin happea läpäisevien Bioflex Silicone PC -linssien kanssa, verrattuna perinteisiin pehmeisiin linssimateriaaleihin.

Bioflex Silicone -piilolinssit kuuluvat materiaalina puolesta luokkaan II a (alle 29 yötä yhtäjaksoisesti silmässä) ja uuteen MDR-luokkaan II b, jolloin näönhuollon ammattilainen voi kontrolloidusti suositella:

- joustavaa käyttörytmiä, jolloin ensisijaisesti päiväkäyttö, mutta satunnainen nukkuminen sallittua
- jatkuvakäyttöisyyttä siten, että linseillä nukutaan maksimissaan 6 yötä yhtäjaksoisesti, ja tämän jälkeen vähintäänkin yksi yö ilman linsejä

Valmistaja

Fit and Cover Servilens | CE 0051
Avd. Ilustración 112, 18016 Granada | Spain

Bioflex Silicone Spheric

Sovitus

Piilolinssien tulisi olla silmässä puolisen tuntia ennen kuin istuvuutta voidaan luotettavasti arvioida.

Linssin tulee keskiöityä tasaisesti ja peittää limbuksen alue myös ylöspäin katsottaessa. Linssin kuuluu liikkua räpäytyksessä noin 1 mm ja seurata kaikissa katesuunnissa. Push-up -testillä sopiva linssi liikkuu kevyesti, mutta palautuu nopeasti.

Bioflex Silicone Spheric (+-)

Bc 8.7 Dia 14.1

+4.00 ... -6.00 (0.25 välein)

+4.50 ... +8.00 (0.5 välein)

- 6.50 ... -10.00 (0.5 välein)

±0 ei saatavilla

Bioflex Silicone Spheric (-)

Bc 8.4 Dia 14.1

-0.25 ... -6.00 (0.25 välein)

-6.50 ... -10.0 (0.50 välein)

±0 ei saatavilla

Bioflex Silicone Toric

Sovitus

On ensiarvoisen tärkeää, että tooriset piilolinssit ovat silmässä vähintään puoli tuntia ennen kuin niiden istuvuutta voidaan luotettavasti arvioida.

Linssin liikkuvuuteen yleiset ohjeet kuten Bioflex Spheric linseillä, mutta toorisen linssin oikea asento on kriittistä. Bioflex Silicone PC Toric linseissä on kohdistusviiva klo 6 kohdalla.

Mikäli linssi kääntyy 10° oikealle eli kohdistusviiva klo 3 suuntaan, eikä näkeminen ole tarkkaa, muutetaan linssin akselisuuntaa siten, että nykyisestä vähennetään 10°. Linssin kääntyessä saman verran vasemmalle eli klo 9 suuntaan, lisätään nykyiseen akselisuuntaan 10°. Muistisääntönä LARS: left=add | right = subtract

Bioflex Silicone Toric

Bc 8.7 Dia 14.4

PWR: + 4.00 ... - 5.00 (0.25 välein) | -5.50 | -6.00

CYL: -0.75 | -1.25 | -1.75 | lisäksi miinuspuolella -2.25

AX: 10° välein