

SOVITUSOHJE

1 Muuta sankalasiiresepti
piilolasivahvuudeksi

2 Jos piilolasivoimakkuus on:
 $+8.00 - -10.00D$ Cyl $\leq 0,50D$

BioFlex
aspheric
A

3 Jos piilolasivoimakkuus on:
 $0.00 - -6.00D$ ja Cyl $0,75D - -1,50D$

$170^\circ - 10^\circ$

BioFlex
toric
H

$10^\circ - 30^\circ$

BioFlex
toric
H+

$80^\circ - 100^\circ$

BioFlex
toric
V

$150^\circ - 170^\circ$

BioFlex
toric
H-