

# Starsoft Bandage & Wulfing

## pehmeät terapeuttiset piilolinssit

**Bandage** -piilolinssi auttaa lievittämään kipua ja suojaamaan sarveiskalvoa epiteelin eheytyksen aikana leikkauksen tai tapaturman jälkeen. Linssiä voidaan käyttää myös nestemäisen lääkeliuoksen levittämiseen.

**Wulfing** -piilolinssi on kaksi kertaa paksumpi kuin Bandage, joten sitä suositellaan erityisesti silloin kun tarvitaan enemmän tukea. Esim. trabekulektomian tai syvän sklerektomian jälkeen suuri piilolinssin halkaisija yhdistettynä paksumpaan linssirakenteeseen suojaa hyvin keinoläppää sekä tukkii vuodon kunnolla.

### Huomioitavaa

Vain näönhuollon ammattilainen voi sovittaa piilolinssit terapeuttiseen käyttöön, jolloin on erittäin tärkeää kontrolloida silmän terveydentilaa huolellisesti mahdollisten komplikaatioiden varalta.

- Sarveiskalvo on tarkistettava turvotuksen, tulehduspesäkkeiden sekä uudissuonituksen varalta.
- Mikäli linssiä on käytetty yhdessä nestemäisen lääkkeiden kanssa, siinä ei tule olla kerrostuneita lääkkeitä tai värimuutoksia.
- Potilasta tulee myös opastaa tunnistamaan mahdolliset infektioiden merkit ja ottamaan välittömästi yhteyttä hoitavaan tahoon oireiden ilmaantuessa.

	<b>Bandage Wulfing Starsoft 66 UV</b>	<b>Bandage Wulfing Starsoft 75 UV</b>	<b>Bandage Wulfing Starsoft 74 UV SiH</b>
<b>Voimakkuus</b>	<b>±0 dpt</b>	<b>±0 dpt</b>	<b>±0 dpt</b>
<b>Kaarevuus (Bc) 0.05 mm välein</b>	<b>6.5 – 12 mm</b>	<b>6.5 – 12 mm</b>	<b>6.5 – 12 mm</b>
<b>Halkaisija (Dia) 0.10 mm välein</b>	<b>10 – 18 mm</b>	<b>10 – 20 mm</b>	<b>10 – 20 mm</b>
<b>Vaihtoväli</b>	<b>päiväkäyttöisenä 6 kk</b>	<b>päiväkäyttöisenä 6 kk</b>	<b>päiväkäyttöisenä 3 - 6 kk</b>
<b>Materiaali</b>	<b>Contaflex 67</b>	<b>Contaflex 75</b>	<b>Definitive 74 SiH</b>
<b>Vesipitoisuus</b>	<b>67%</b>	<b>74.5%</b>	<b>74%</b>
<b>Hapenläpäisy</b>	<b>DK-30</b>	<b>DK-43</b>	<b>DK-60</b>
<b>UV-suoja</b>	<b>Kyllä</b>	<b>Kyllä</b>	<b>Kyllä</b>

### Yleisimmin käytetyt parametrit Bc/Dia:

10.0/18mm | 9.5/17mm | 9.0/16mm | 8.7/15mm | 8.6/15mm | 8.5/14mm

**Valmistaja:** Star-Lens AB | CE 0413 | Nygårdsvägen 9 | SE-662 34 Åmål | Sweden