



Starsoft KK

Silmäsairaalayhteistyössä kehitetty pehmeä päivkäyttöinen keratokonus-piilolinssi. Saatavilla laajalla parametrialueella kolmesta eri materiaalista valmistettuna.

Erittäin hyvä ja helppo valinta ensimmäiseksi piilolinssiksi keratokonuksen hoitoon.


Linssiä on sovitettu onnistuneesti potilaille, joilla on Intacs-renkaat. Myös sarveiskalvon siirron jälkeen on tehty hyvin onnistuneita sovituksia.

Tilaukset ja lisätiedot: novalens@novalens.fi

Starsoft Keratokonus (KK)

Design

Soft KK -linssissä on paksumpi optinen keskialue, jonka avulla linssi säilyttää muotonsa silmän pinnan epätasaisuudesta huolimatta. Muotoilunsa ansiosta linssi keskiöityy helpommin ja pysyy erittäin hyvin silmässä. Linssissä on lisäksi pieni reunanoste käyttömukavuuden lisäämiseksi. Standardihalkaisijalla 14.3 mm keskipaksuus on 0,7mm. Huom, voidaan valmistaa ohuempana/paksumpana.

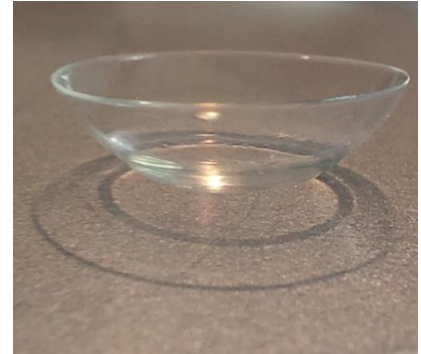

”Kantolinssistä” huolimatta KK-piilolinssi on valmistettu yhdessä osassa. Näin saadaan aikaan sfäärinen optisesti laadukas rakenne.

Sovitus

Valitse ensimmäisen sovitettavan linssin kaarevuudeksi loivin K-arvo +0,6 mm. Keratokonus-potilaiden sarveiskalvon epäsäännönmukaisuuden takia diagnostisen sovitulinssin käyttö on erittäin suositeltavaa. 8 linssin sovitussarja on ostettavissa / lainattavissa Novalensilta.

	KK Starsoft 66 UV	KK Starsoft 75 UV	KK Starsoft 74 UV SiH
Kuvaus	Kaikkein suosituin KK linssiversio. Perinteinen ”supermateriaali”.	Erittäin miellyttävä käytössä. Linssissä on pehmeämpi ja ohuempi tuntuma.	Paras hapenläpäisy. Mukava käytössä, mutta voi olla hieman liukaspintainen.
Voimakkuus 0.25 dpt välein	-40... +40 dpt	-40... +40 dpt	-40... +40 dpt
Kaarevuus 0.05 mm välein	6.5 – 12.0 mm	6.5 – 12.0 mm	6.5 – 12.0 mm
Halkaisija 0.10 mm välein	10.0 – 18.0 mm	10.0 – 20.0 mm	10.0 – 20.0 mm
Vaihtoväli	6 kk	6 kk	3 - 6 kk
Materiaali	Contaflex 67	Contaflex 75	Definitive 74 SiH
Vesipitoisuus	67%	74.5%	74%
Hapenläpäisy	DK-30	DK-43	DK-60
UV-suoja	Kyllä	Kyllä	Kyllä

Käsittelyvinkki

Linssi on helpointa poistaa silmästä nipistämällä reunoilta kevyesti, jolloin linssin alle pääsee hieman ilmaa.

Hoito- ja puhdistus

Normaalit, pitkän vaihtovälin ja pehmeän piilolinssin hoitomenetelmät soveltuvat.

Valmistaja

Star-Lens AB | CE 0413
Nygårdsvägen 9 | SE-662 34 Åmål | Sweden