



Piilolinssien puhdistus

Bioflex	Hydrogeeli -linssit voidaan puhdistaa kaikilla pehmeille piilolinssseille tarkoitetuilla hoitomenetelmillä. Ohjeistus on voimassa myös värjätyille linssseille.
Bioflex Silicone	Silikonihydrogeeli -linssit voidaan puhdistaa kaikilla pehmeille piilolinssseille tarkoitetuilla hoitomenetelmillä.
Artvisio	Värjätyt (Biofinity) silikonihydrogeeli -linssit voidaan puhdistaa kaikilla pehmeille piilolinssseille tarkoitetuilla hoitomenetelmillä.
Starsoft / Zero 6	Kaikki pehmeiden piilolinssien hoitomenetelmät soveltuvat. Pitkän vaihtovälin linssille suositellaan erillistä pintapuhdistusta sekä proteiininpoistoa. Ohjeistus on voimassa myös värjätyille linssseille.
Starlens RGP	Kaikki kovien happea läpäisevien linssien puhdistus- ja hoitomenetelmät soveltuvat. Linssien käyttöiän maksimoimiseksi suositellaan erillistä proteiininpoistoa.
Cantor Prosthetic	Puhdistukseen ei voi käyttää vetyperoksidipohjaisia menetelmiä, koska ne haalistavat linssin väriä. Myöskään tynnyrikotelon käyttöä ei suositella.
Nissel Custom	EDTA:ta (edetate disodium) sisältävät hoitonesteet haalistavat linssin väriä. Vetyperoksidipohjaista puhdistusta, joka ei sisällä EDTA:ta, voi käyttää.
EyeBrid Silicone	Pintapuhdistus keskiosan RGP alueelle, jonka lisäksi silikonihelmalle soveltuva all-in-one tai vetyperoksidipohjainen puhdistusmenetelmä.
AKS Scleral	Kovien happea läpäisevien linssien puhdistusmenetelmä ja lisäksi viikottainen proteiininpoisto. Huom, Menicon Progent / alkoholipohjainen puhdistus ei ole sallittu.