



Rengöring av kontaktlinser

Bioflex	Hydrogel-linser kan rengöras med alla skötselmetoder för mjuka kontaktlinser. Anvisningarna gäller även för färgade linser.
Bioflex Silicone	Silicone Hydrogel-linser kan rengöras med alla skötselmetoder för mjuka kontaktlinser.
Artvisio	Färgade (Biofinity) silikonhydrogel-linser kan rengöras med alla skötselmetoder för mjuka kontaktlinser.
Starsoft / Zero 6	Alla skötselmetoder för mjuka kontaktlinser är lämpliga. För linser med lång utbytestid rekommenderas en separat rengöring av ytan och avlägsnande av protein. Denna riktlinje gäller även för färgade linser.
Starlens RGP	Alla rengörings- och behandlingsmetoder för hårda, syrepermeabla kontaktlinser är lämpliga. För att maximera linsernas livslängd rekommenderas en separat proteinextraktion.
Cantor Prosthetic	Använd inte väteperoxidbaserad rengöring, eftersom de bleker linsens färg. Användning av ett fatfodral rekommenderas inte heller.
Nissel Custom	Kontaktlinslösningar som innehåller EDTA (edetate disodium) bleknar linsens färg. Ett väteperoxidbaserat rengöringsmedel som inte innehåller EDTA kan användas.
EyeBrid Silicone	Separat rengöring av det centrala RGP-området, följt av en allt-i-ett eller väteperoxidbaserad rengöringsmetod som är lämplig för silikonhydrogel-material.
AKS Scleral	Hård syrepermeabel linsrengöringsmetod plus veckovis borttagning av proteiner. Anmärkning: Menicon Progent/alkoholbaserad rengöring är inte tillåten.