

Nissel Custom XL

Karsastuskorjaus piilolinssillä

Sovitus



	PIILOLINSSIN HALKAI SIJA / KAAREVUUS															
Loivin K	16,00	16,50	17,00	17,50	18,00	18,50	19,00	19,50	20,00	20,50	21,00	21,50	22,00			
6,90	8,90	8,90	9,10													
7,00	8,90	8,90	9,10													
7,10	9,00	9,00	9,20													
7,20	9,00	9,00	9,20	9,30												
7,30	9,00	9,00	9,20	9,20												
7,40	9,00	9,00	9,20	9,20	9,40											
7,50	9,10	9,10	9,30	9,30	9,50											
7,60	9,10	9,10	9,30	9,30	9,50	9,50										
7,70	9,20	9,20	9,40	9,40	9,60	9,60										
7,80	9,20	9,20	9,40	9,40	9,60	9,60	9,80									
7,90	9,30	9,30	9,50	9,50	9,70	9,70	9,90									
8,00	9,40	9,40	9,60	9,60	9,80	9,80	10,00									
8,10	9,50	9,50	9,70	9,70	9,90	9,90	10,10									
8,20	9,60	9,60	9,80	9,80	10,00	10,00	10,20	10,20								
8,30	9,70	9,70	9,90	9,90	10,10	10,10	10,30	10,30								
8,40	9,70	9,70	9,90	9,90	10,10	10,10	10,30	10,30	10,50							
8,50	9,80	9,80	10,00	10,00	10,20	10,20	10,40	10,40	10,60							
8,60	9,90	9,90	10,10	10,10	10,30	10,30	10,50	10,50	10,70	10,70						
8,70	10,00	10,00	10,20	10,20	10,40	10,40	10,60	10,60	10,80	10,80						
8,80	10,10	10,10	10,30	10,30	10,50	10,50	10,70	10,70	10,90	10,90	11,10					
8,90	10,20	10,20	10,40	10,40	10,60	10,60	10,80	10,80	11,00	11,00	11,20	11,20				
9,00	10,30	10,30	10,50	10,50	10,70	10,70	10,90	10,90	11,10	11,10	11,30	11,30	11,30			
9,10	10,40	10,40	10,60	10,60	10,80	10,80	11,00	11,00	11,20	11,20	11,40	11,40	11,40			
9,20	10,50	10,50	10,70	10,70	10,90	10,90	11,10	11,10	11,30	11,30	11,50	11,50	11,50	11,50		
9,30	10,60	10,60	10,80	10,80	11,00	11,00	11,20	11,20	11,40	11,40	11,60	11,60	11,60	11,60		
9,40	10,70	10,70	10,90	10,90	11,10	11,10	11,30	11,30	11,50	11,50	11,70	11,70	11,70	11,70	11,90	
9,50	10,80	10,80	11,00	11,00	11,20	11,20	11,40	11,40	11,60	11,60	11,80	11,80	11,80	11,80	12,00	12,00
9,60	10,90	10,90	11,10	11,10	11,30	11,30	11,50	11,50	11,70	11,70	11,90	11,90	11,90	11,90	12,10	12,10
9,70	11,00	11,00	11,20	11,20	11,40	11,40	11,60	11,60	11,80	11,80	12,00	12,00	12,00	12,00	12,20	12,20
9,80	11,10	11,10	11,30	11,30	11,50	11,50	11,70	11,70	11,90	11,90	12,10	12,10	12,10	12,10	12,30	12,30
9,90	11,20	11,20	11,40	11,40	11,60	11,60	11,80	11,80	12,00	12,00	12,20	12,20	12,20	12,20	12,40	12,40
10,00	11,30	11,30	11,50	11,50	11,70	11,70	11,90	11,90	12,10	12,10	12,30	12,30	12,30	12,30	12,50	12,50

XL-kokoinen dynaamisesti stabiloitu testilinssi on kauttaaltaan värjätty ja keskellä on harmaa läpinäkymätön iiris. Piilolinssin halkaisijan tulisi olla riittävän suuri (useimmiten vähintään 16mm) iiriksen uudelleen kohdentamista ajatellen. Oheisessa taulukossa on suuntaa antava ohjeistus ensimmäisen sovitulinssin valintaan keratometriarvoihin perustuen. Sovitustilanteessa otettujen valokuvien ja optikon huomioiden perusteella nähdään miten linssi asettuu silmään. Stabilointimerkkien avulla pystytään arvioimaan mitä tai miten kustomoidaan seuraavaa testilinssiä. Kun istuvuudeltaan oikeanlainen linssi on löytynyt niin siihen maalataan iiris, pupilli ja sidekalvo asiakkaan tervettä silmää mukaillen.



102 erilaista iirisväriä
tai räätälöinti valokuvan mukaan

Sovitulinssi suurella halkaisijalla :

- ✓ Keratometri arvot (molemmista silmistä)
- ✓ Linssin halkaisijan arviointi (jonka perusteella BC)
- ✓ Iiriksen halkaisija (vakio 12 mm)
- ✓ Valokuva(t), jossa molemmat silmät näkyvissä

Sovitulinssin istuvuuden arviointi :

- ✓ Anna testilinssin asettua vähintään 30 min
- ✓ Varmista hyvä liikkuvuus, ei tarvetta liioitella
- ✓ Hyvin istuvan linssin kiertyessä merkittävästi, voidaan tarvita erillinen primateasapainotus
- ✓ Ota sovituskuvat kotisuoraan ja hyvässä valossa