


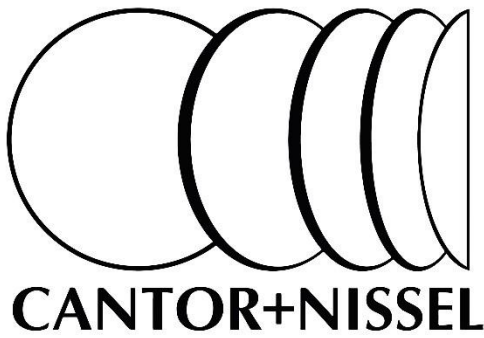

SOFT CONTACT LENS INSTRUCTIONS FOR USE

CSD.99 (ISSUE 14 - FEBRUARY 2023)
(ORIGINAL ISSUE - JULY 1996)

Slovenia



VIKTIGT

Slut användaren måste läsa igenom denna bruksanvisning innan användning.
Linser ska inte användas såvida de inte har ordinerats av en registrerad ögonläkare. Användaren av produkten MÅSTE läsa igenom denna bruksanvisning INNAN användning då den innehåller viktig information.

Beskrivning

Alla mjuka kontaktlinser som tillverkas av Cantor Barnard Ltd omfattas av denna bruksanvisning.

Avsedd användning

Sterila mjuka linser ska bäras på framsidan av ögat för att korrigera synstillstånd och för att lindra synsymptom som kan uppstå samtidigt med akademiska färdighetstörningar.

Indikationer för användning och kliniska fördelar

Enhet	Klinisk indikation
Hydrolens	Behandling av närsynthet, översynthet, astigmatism, presbyopi, maskering av kosmetiska defekter i ögat, färgbrist och akademiska färdighetstörningar
Cantor Prosthetic	
Cantor Cosmetic	
X-Chrom	
ChromaGen	
Nissel Custom	
PV Series	
Omniflex	
Hydrofit	
30 Days	
Hydrocyl	
Meridian Toric	
Nissel Kii Toric Soft	
Zero 6	
Pastel Tints	

Bruksanvisning

Dessa linser är mjuka standardkontaktlinser för daglig användning. Din ögonläkare föreslår hur länge du ska använda linserna. Din ögonläkare rekommenderar användning, rengöring och byte. Följ dessa rekommendationer. Om du är osäker ska du prata med din ögonläkare.

Instruktioner om hantering av linser och användning av linsvätska

- Klipp och jämna till dina fingernaglar för att undvika att repa dina ögon eller kontaktlinser.
- Tvätta alltid dina händer med varmt vatten och tvål samt torka dem ordentligt innan du hanterar linserna.
- Linserna kan förorenas om du inte tvättar händerna ordentligt.
- Hantera alltid dina linser på en väl upplyst, ren och steril plats.
- Dina kontaktlinser kan skadas om de inte hanteras korrekt.

Risken för infektion är högre vid fel hantering av kontaktlinser och linsvätska.


- Kontrollera linserna och förpackningen**
- Kontrollera vilka linser som är för det högra ögat och vilka som är för det vänstra (om tillämpligt).
- Kontrollera att det inte är något fel på linserna, förpackningen eller förseglingen. Om något skulle vara fel, till exempel om det förekommer skada eller läckage, ska du inte öppna eller använda produkten. Ta kontakt med inköpsstället.

Ta ut linserna ur den sterila förpackningen

- Håll i förpackningen och dra med ena handen uppåt mot förslutningen på förpackningen.
- Ta bort metallförseglingen från flaskans topp och därefter pluggen.
- Ta ut linserna med en pincett med mjuka ändar, eller håll försiktigt ut linserna ur flaskan med saltlösningen.

Kontrollera lins – bild 1

- Håll i kanten på linsen och rör den långsamt upp och ner för att avlägsna vätskan.
- Lägg den konvexa ytan på pekfingeret och kontrollera linsen.
- Säkerställ att linsen inte är felvänd (bild 1).
- Kontrollera att linsen är felfri, till exempel att den inte är deformerad, missfärgad, skadad, repad eller smutsig. Använd inte linsen om du upptäcker några avvikelser.

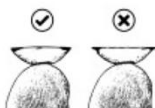

Figur 1

CE	CE-märkning av överensstämmelse med Förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter.
UKCA	UKCA-märkning av överensstämmelse med UK Medical Device Regulations 2002.
MD	Medicinteknisk utrustning
	Importör
	Tillverkare
EC REP	Europeisk auktoriserad representant EC Rep (Emergo Europe) Emergo Europe Westervoortsedijk 60, 6827 AT Arnhem The Netherlands
CH REP	Schweizisk representant CH Rep (Decomplex AG) Decomplex AG Freiburgstrasse 3 3010 Bern Switzerland
LOT	Partikod
UDI	Unik enhetskod
	Tillverkningsdatum
	Förbrukningsdatum
STERILE	Steriliserad med ånga.
	Bräcklig, hantera med försiktighet.
r_1	Radie för den bakre (centrala) optiska zonen
P^+	Den paraxiella bakre vertexens styrka
d_1	Total diameter
	Axel
F^+	Cylinderstyrka
Wwater	Vatten innehåll
	Använd inte förpackningen om den är skadad, och läs bruksanvisningen.
	En patient Flera användningsområden
	Läs bruksanvisningen eller läs den elektroniska bruksanvisningen.



Figur 2 & 3

Sätt in lins – bild 2

- Lägg linsen på fingret och dra ner det nedre ögonlocket med långfingeret på samma hand. Dra upp det övre ögonlocket med pekfingeret på din andra hand. Placera fingret på fransraden för att öppna ögat så mycket som möjligt.
- Kontrollera i spegeln att hornhinnan är placerad centralt. Fortsätt se i spegeln, för långsamt linsen närmare ögat och sätt in den. Om du ser uppåt medan du gör detta kommer linsen inte att placeras centralt på hornhinnan (bild 2).
- När du har placerat linsen korrekt på hornhinnan ska du långsamt ta bort pekfingeret och släppa ögonlocket, först det nedre och därefter det övre. Om du tar bort fingrarna för fort eller blinkar för snabbt kan linsen byta position eller falla ut.
- Kontrollera i spegeln att linsen sitter ovanpå hornhinnan. Håll sedan handen över det andra ögat och kontrollera synen i båda ögonen. Upprepa proceduren för att sätta in linsen i det andra ögat.
- Spädbarn och småbarn bör få sina linser monterade av en ansvarig vuxen som är bekant med att passa kontaktlinser och som följer ögonläkarens rekommendationer.

Ta ur lins – bild 3

- Kontrollera linsens position i spegeln.
- Se rakt in i spegeln och luta huvudet framåt samtidigt som du fortsätter se dig i spegeln.
- Placera dina pekfinger på det övre och det undre ögonlocket.
- Använd sedan fingrarna och ögonlocken för att försiktigt lossa linsen från hornhinnans yta.

Underhåll av kontaktlinser

- Dina tårar innehåller proteiner och lipider som fäster sig på kontaktlinsernas yta när du använder dem. Därför är det viktigt att du tvättar, sköljer, desinficerar och förvarar dina linser på rätt sätt.
- Om du inte följer dessa anvisningar och tar hand om linserna på rätt sätt kan de bli smutsiga, vilket kan leda till allvarig ögonsjukdom eller ögoninfektion.
- Använd linsprodukter enligt det medföljande häftet eller instruktionerna.
- Hur smutsiga linserna blir, varierar från person till person. Om dina linser tenderar att bli smutsiga kan du försöka att försiktigt gnugga dem med en rengöringslösning eller använda en proteinborttagare. Om du inte kan rengöra linserna ordentligt ska du kasta dem.
- Byt ut dina linser en gång i månaden eller varannan månad. Långvarig användning resulterar i en spridning av bakterier på grund av uppbyggning av smuts, vilket gör desinfektion otillräcklig och kan leda till ögoninfektion.
- Om du inte har använt kontaktlinserna på länge måste du desinficera dem på nytt enligt instruktionerna för den aktuella linsvätskan, och använda ett nytt insetu.

Kompatibla rengöringslösningar för kontaktlinser:

- Ote Twins Active
- Avizor Unica Sensitive

Förvaring och transport av kontaktlinser

- Dina kontaktlinser är sterila tills du bryter förseglingen. Om du inte använder linsema omedelbart efter att du har brutit förseglingen ska de förvaras i lämpligt linsetui med linsvätska.
- Kontaktlinser som har tagits ur sin förpackning ska transporteras i ett lämpligt linsetui för att säkerställa att de förblir sterila samt för att förhindra att smuts och bakterier tränger in.

Kontraindikationer

Medicinska tillstånd

- Akut och subakut ögoninflammation, ögoninfektion, uveit, minskad hornhinne känslighet, torra ögon eller sjukdom i tårapparat
- i en omfattning som utgör ett problem för användning av kontaktlinser, ögonlockssjukdom eller allergi i en omfattning som påverkar användningen av linser, och andra sjukdomar som kan komplicera användningen av kontaktlinser.

Miljöförhållanden

- Alla som bor eller arbetar i torra miljöer. Alla som bor eller arbetar i en miljö, där damm eller kemikalier kan ta sig in i ögat.
- Användning med icke-kompatibla rengöringslösningar är kontraindicerat.

Personliga egenskaper

- Alla som inte kan följa sin ögonläkares rekommendationer eller använda kontaktlinser på rätt sätt och alla som inte går på regelbundna kontroller eller följer den hygienrutin som krävs för att använda kontaktlinser.

Linserna kan vara skadade eller skadas. Om du oavsiktligt har använt en lins som är skadad eller på annat sätt defekt, eller om en lins skadas medan du använder den, ska du genast plocka ur linsen och prata med din ögonläkare.

Försiktighetsåtgärder

Läs igenom detta häfte noga innan du använder dina kontaktlinser. Om du är osäker på villkoren eller informationen här ska du kontakta din ögonläkare innan du använder produkten.

Behåll detta dokument för framtida bruk.

- Använd inte kontaktlinser som är skadade.
- Använd inte kontaktlinser längre än den rekommenderade användningsperioden.
- Använd kontaktlinser i enlighet med rekommenderade metoder för hantering av kontaktlinser.
- Gå alltid på regelbundna kontroller.
- Om du upplever några som helst problem ska du omedelbart kontakta din ögonläkare.
- Sätt alltid in linsema så fort du har öppnat förpackningen, då de enkelt kan bli förorenade. Om du inte sätter in linsema på en gång ska du förvara dem enligt instruktionerna för de linsprodukter du använder.
- Gnugga dig inte i ögonen när du använder linser. Detta kan leda till repor på ytan av din hornhinna eller förskjutning av linsen.
- Förvänta inte linsema för höger och vänster öga – detta kan leda till nedsatt syn och obehag.
- Säkerställ att du har lämpliga glasögon att använda om du inte kan använda dina kontaktlinser på grund av tillståndet på dina ögon eller av andra skäl, eller om du har använt linsema längre än den rekommenderade användningstiden som din ögonläkare har fastställt. Om du trots detta fortsätter använda linsema kan detta leda till ögonsjukdomar eller andra problem.
- Följ din ögonläkares instruktioner om du använder ögondroppar samtidigt som du använder kontaktlinser.
- Läs inte kosmetika, läkemedel eller andra ämnen komma i kontakt med dina linser. Om kosmetika (eyeliner, rengöringsprodukter osv.) förorenar linsen kan detta resultera i missfärgning, irritation och/eller sämre kvalitet på kontaktlinsen.
- När dina ögon och kontaktlinser utsätts för hård vind (vid cykling, skidåkning, direkt vind osv.) ska du alltid använda någon form av skydd mot vinden, till exempel solglasögon eller skidglasögon. Gör du inte detta kan det resultera i obehagligt torra linser och/eller förskjutning av linsen.
- Om du får lösningsmedel såsom tvättmedel eller rengöringsprodukter i ögonen ska du plocka ut linsema omedelbart, kasta dem och kontakta din ögonläkare.
- Du ska aldrig använda någon annans kontaktlinser eller låta någon annan använda dina linser – detta kan resultera i infektion och allvarliga ögonsjukdomar.
- Användare som tycker det är svårt att sätta in linser, till exempel äldre personer, barn eller personer med svår synnedsättning, ska först be en ögonläkare om råd.
- En del gravida kvinnor kan uppleva att linser (som en gång var bekväma) känns obehämliga och att deras syn tillfälligt försämrats. Fortsatt användning av linser bör då diskuteras med en ögonläkare.
- Personer som lider av allergier kan vara mer benägna att få ögon- och hudsjukdomar än andra som använder kontaktlinser. En ögonläkare kan ge vägledning innan sådana personer använder kontaktlinser.
- Användning av kontaktlinser kan påverkas av sjukdom, graviditet, barnafödself, mediciner, fysisk hälsa, ögonsjukdomar och livsmiljö. Förhållandena under vilka du använder kontaktlinser kan också förändras efter att du har börjat använda linsema.
- Prata med din ögonläkare innan du använder filtrerade linser vid dåliga ljusförhållanden, i synnerhet när du kör bil och använder maskiner.

Varningar

För säker användning av kontaktlinsema ska du läsa igenom detta häfte noga samt följa din ögonläkares instruktioner och korrekt metoder för hantering av kontaktlinser.

Om du upplever smärta eller bestående obehag ska du omedelbart sluta använda linsema och kontakta din ögonläkare. Användning av kontaktlinser och direkt exponering för icke-sterila vattenkällor (till exempel kranvatten, bad, dusch, simning, vattensport osv.) ökar väsentligt risken för mikrobiell infektion och permanent ögonskada.

Användning av icke-sterilt vatten (kranvatten osv.) vid hantering av kontaktlinser och linsetuier ökar väsentligt risken för mikrobiell infektion och permanent ögonskada.

Byt inte linsprodukter, linstyper eller parametrar utan att först diskutera detta med din ögonläkare. Felaktig hantering och användning av linsvätskor kan leda till allvarlig infektion. Följ alla instruktioner från tillverkaren av linsvätskan och se till att desinficera linsema enligt instruktionerna för den aktuella linsvätskan.

Bortskaffning av kontaktlinser

Kontaktlinser kan slängas i det vanliga hushållsavfallet. Kontaktlinser ska INTE spolas ner i toaletten eller handfatet. Bortskaffning av kontaktlinser ska helst ske genom ett dedikerat återvinningsprogram för kontaktlinser.

Biverkningar

Exempel på ovanliga ögonsjukdomar som kan orsakas av mjuka kontaktlinser

- Homhinneödem
- Homhinneår
- Keratitis (inklusive infektiös keratit och akantamöbekeratit)
- Konjunktivit
- Subkonjunktival blödning
- Kornealerosion
- Kärniväxning i homhinna

Patientmålgrupp och avsedda användare

Sterila mjuka linser ordinas av en ögonläkare för personligt bruk.

Sterila mjuka linser är avsedda att användas av patienter från 0 till 70+ år

Produktens prestandaegenskaper

Produktens prestandaegenskaper anges på etiketten.

Nödvändiga egenskaper som linsvätska, proteinborttagare och linsetui måste ha för att de ska vara lämpliga att använda med linsema

Universallösning rekommenderas för linsrengöring, men detta kommer din ögonläkare att informera dig om.

Kompatibla rengöringslösningar för kontaktlinser:

- Ote Twins Active
- Avtor Unica Sensitive

Ögonläkaren ger dig råd om eventuella proteinborttagare och rekommenderade förvaringsbehållare.

Förklaring om allvarlig händelse

Alla allvarliga incidenter som har inträffat i samband med produkten ska rapporteras till tillverkaren och tillämplig behörig myndighet.



Cantor Bamard LTD
Market Place, Brackley
Northamptonshire, NN13 7NN
United Kingdom



EU Importör
Cantor Bamard (Ireland)
Unit 8, IDA Business Park
Ardee Road, Dunleer
Drogheda Co Louth
A92D2S2, Ireland



CH Importör