

PEHMEÄT PIILOLINSSIT

KÄYTTÖOHJEET

VAROITUKSET

1. On erittäin tärkeää, että näönhuollon ammattilainen tarkastaa silmäsi ja piilolinssiesi istuvuuden vähintään kuuden kuukauden välein.
2. Vain henkilökohtaiseen käyttöön.
3. Älä nuku piilolinssit silmissäsi, ellei näönhuollon ammattilainen ole ohjeistanut, että se on turvallista.
4. Älä käytä piilolinssesiä pidempään kuin näönhuollon ammattilainen suosittelee.
5. Älä koskaan käytä kotitalouskäyttöön tarkoitettuja puhdistusaineita piilolinssillesi.
6. Älä käytä silmätippoja piilolinssien ollessa silmässä, ellei näönhuollon ammattilainen ole niin neuvonut.
7. Älä käytä sylkeä piilolinssien kostuttamiseen tai silmään asettamiseen.
8. Älä huuhtelee piilolinssesiä tai linssikoteloja vesijohtovedellä.
9. Linssit toimitetaan erityisissä koteloidessa, jotka on täytetty puskuroidulla piilolinssien kostutusnesteellä. Piilolinssit on puhdistettava ja desinfioitava jokaisen käyttökerran jälkeen kohdasta "Desinfiointi ja kostutus" löytyvien ohjeiden mukaisesti.

Pese ja kuivaa kätesi huolellisesti aina ennen piilolinssien käyttöä. Varmista, että linssi on kostea ja kokonaan nesteen peitossa. Älä käytä linssiä, jos pakkaus on vaurioitunut. Piilolinssesi ei ole tarkoitettu tai suunniteltu yhteiskäyttöön.

LINSSIN SILMÄÄN LAITTO

1. Varmista, että linssi on oikein päin asettamalla se etusormen päähän ja tarkistamalla muoto (kuvat 1 ja 2)
2. Käytä toisen käden etu- ja keskisormea pitämään yläluomi auki. Pidä alaluomi auki linssiä lähinnä olevalla keskisormella ja aseta linssi varovasti silmään (kuva 3). Toista sama menettely toiselle silmälle.

LINSSIN POISTO

Katso ylöspäin ja pidä alaluomi alhaalla. Liu'uta linssiä varovasti kohti silmän valkoista osaa, minkä jälkeen linssi voidaan ottaa pois silmästä puristamalla sitä varovasti peukalon ja etusormen välissä (kuva 4). Toisen silmän kohdalla toimitaan samoin.

DESINFIOINTI JA KOSTUTUS

Puhdista ja desinfioi piilolinssit näönhuollon ammattilaisen suositteleman puhdistusnesteen käyttöohjeen mukaisesti.

JOS PIILOLINSSIT KUIVUVAT

Kostuta linssit piilolinssinesteellä desinfiointia varten, minkä jälkeen voidaan noudattaa kohdassa "Desinfiointi ja kostutus" kuvattua ohjeistusta.

VAROTOIMENPITEET

1. Nämä piilolinssit on suunniteltu vaihdettavaksi säännöllisesti. Näönhuollon ammattilainen antaa suosituksen siitä, milloin piilolinssit tulisi vaihtaa. Älä poikkeaa näistä suosituksista ja epäselvissä tapauksissa ota yhteys näönhuollon ammattilaiseen.
2. Puhdista ja desinfioi piilolinssit aina käytön jälkeen ohjeiden mukaisesti.
3. Jos silmäsi punoittavat, ärsyntyvät tai tunnet kipua, poista piilolinssit välittömästi ja ota yhteys näönhuollon ammattilaiseen.
4. Vältä tilanteita, joissa piilolinssisi voivat likaantua meikistä, suihkeista peräisin olevista aerosoleista tai myrkyllisistä höyryistä.
5. Vaihda likaantuneet, vaurioituneet tai rikkiäiset piilolinssit välittömästi.
6. Vältä pitkiä kynsiä, sillä ne saattavat sisältää bakteereja, jotka voivat vahingoittaa sekä silmää että linssesiä.
7. Pidä piilolinssit poissa lasten ulottuvilta.
8. Piilolinssit ovat turvallisia vesiurheilussa vain silloin, kun käytetään hyvin istuvia suojalaseja.
9. Säilytä huoneenlämmössä.

KÄYTTÖTARKOITUS

Pehmeät piilolinssit on tarkoitettu näön korjaamiseen päiväkäytössä.

ESTEET PIILOLINSSIEN KÄYTÖLLE

Poista piilolinssit välittömästi ja ota yhteys näönhuollon ammattilaiseen, mikäli ilmenee yliherkkyyttä piilolinssille, valoherkkyyttä, silmien punoitusta, liiallista kyynelehtimistä, silmien kirvelyä, näön heikkenemistä, silmien vuotamista tai havaitset haloja esineiden/valonlähteiden ympärillä.

KOVAT HAPPEA LÄPÄISEVÄT PIILOLINSSIT

KÄYTTÖOHJEET

VAROITUKSET

1. On erittäin tärkeää, että näönhuollon ammattilainen tarkastaa silmäsi ja piilolinssiesi istuvuuden vähintään kuuden kuukauden välein.
2. Vain henkilökohtaiseen käyttöön.
3. Älä nuku piilolinssit silmissäsi, ellei näönhuollon ammattilainen ole ohjeistanut, että se on turvallista.
4. Älä käytä piilolinssesi pidempään kuin näönhuollon ammattilainen suosittelee.
5. Älä koskaan käytä kotitalouskäyttöön tarkoitettuja puhdistusaineita piilolinssillesi.
6. Älä käytä silmätippoja piilolinssien ollessa silmässä, ellei näönhuollon ammattilainen ole niin neuvonut.
7. Älä käytä sylkeä piilolinssien kostuttamiseen tai silmään asettamiseen.
8. Älä huuhtelee piilolinssesi tai linssikoteloä vesijohtovedellä.
9. Linssit toimitetaan erityisissä kotelossa, jotka on täytetty puskuroidulla piilolinssien kostutusnesteellä. Piilolinssit on puhdistettava ja desinfioitava jokaisen käyttökerran jälkeen kohdasta "Huolto" löytyvien ohjeiden mukaisesti.

SISÄLTÖ

Yksi tai useampi kova happea läpäisevä piilolinssi Hydrosoft+ nesteessä. Sisältää säilöntäainetta PHBM 0,0001%. Nämä linssit on tarkoitettu päivittäiseen käyttöön. Linssit toimitetaan erityisessä linssipidikkeessä kotelossa, joka on täytetty nesteellä. Linssikotelon avaamisen jälkeen tämä neste säilyy kahden kuukauden ajan. Linssit on puhdistettava välittömästi käytön ja linssien poistamisen jälkeen kohdassa "Huolto" kuvatulla tavalla.

PIIOLINSSIN SILMÄÄN LAITTO JA POISOTTO SEKÄ KÄYTTÖAJAT

Noudata näönhuollon ammattilaisen ohjeistusta.

HUOLTO

Puhdista piilolinssit päivittäin kovien happea läpäisevien piilolinssien puhdistusnesteellä. Noudata aina näönhuollon ammattilaisen suosittelemaa puhdistus- ja huoltorutiinia. Säilytä linssit aina suljetussa piilolinssikotelossa tuoreessa piilolinssinesteessä ja vaihda neste päivittäin. Piilolinssesi ei saa koskaan säilyttää vesijohtovedessä eikä niitä saa huuhdella vesijohtovedellä. Vesijohtovesi sisältää mikro-organismeja, jotka voivat tarttua linssihin ja aiheuttaa silmätulehduksia, jotka hoitamattomina voivat johtaa pysyvään näön menetykseen.

ESTEET PIIOLINSSIEN KÄYTÖLLE

Poista piilolinssit välittömästi ja ota yhteys näönhuollon ammattilaiseen, mikäli ilmenee yliherkkyyttä piilolinssille, valoherkkyyttä, silmien punoitusta, liiallista kyynelehtimistä, silmien kirvelyä, näön heikkenemistä, silmien vuotamista tai havaitset haloja esineiden/valonlähteiden ympärillä.

VAROTOIMENPITEET

Vältä kosketusta meikkien tai suihkeiden kanssa. Linssit on poistettava välittömästi sen jälkeen, kun olet joutunut kosketuksiin haitallisten höyryjen, esim. kemiallisten tai vaarallisten aineiden kanssa, tai silmien kannalta vaarallisen ympäristön kanssa. Vaihda likaantuneet, vaurioituneet tai rikkoutuneet piilolinssit aina välittömästi. Vältä pitkiä kynsiä, sillä niiden alla voi olla bakteereja ja kerrostumia, jotka voivat vahingoittaa silmää sekä piilolinssiä. Pidä piilolinssit aina lasten ulottumattomissa. Uiminen piilolinssit päässä altistaa silmät lisääntyneelle mikrobiologisen infektion riskille. Käytä aina asianmukaisia uimalaseja, jos piilolinssesi käytetään uimessa. Säilytä huoneenlämmössä.

KÄYTTÖTARKOITUS

Kovat happea läpäisevät piilolinssit on tarkoitettu näön korjaamiseen päiväkäytössä. Ortho-K-linssit on suunniteltu siten, että niitä käytetään nukkuessa ja että ne poistetaan päivällä.

PIIOLINSSIEN PITKÄAIKAINEN SÄILYTYS

Puhdista linssit näönhuollon ammattilaisen suosituksen mukaisesti. Kuivaa nukkaamattomalla liinalla ja aseta linssit kuivaan, puhtaaseen säilytyskoteloon ja sulje kotelo tiiviisti. Puhdista piilolinssit ja jätä koteloon vähintään 2 tunniksi ennen käyttöönottoa.