

MJUKA KONTAKTLINSER

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

VARNINGAR

1. Det är av yttersta vikt att din ögonvårdspersonal kontrollerar dina ögon och utformningen av dina kontaktlinser minst var sjätte månad.
2. Endast för personligt bruk.
3. Sov inte med dina kontaktlinser om inte din ögonvårdspersonal säger att du kan göra det på ett säkert sätt.
4. Bär inte kontaktlinserna längre än vad som rekommenderas av din ögonvårdspersonal.
5. Använd aldrig hushållsrengöringsmedel eller tvättmedel på dina kontaktlinser.
6. Använd inte ögondroppar när du använder dina kontaktlinser om inte annat rekommenderas av din ögonvårdspersonal.
7. Använd inte saliv för att fukta eller sätta in dina kontaktlinser.
8. Skölj inte dina kontaktlinser eller linsfodralet med kranvatten.
9. Linserna levereras i speciella linshållare som är fyllda med en vätskelösning för kontaktlinser. Kontaktlinserna måste rengöras och desinficeras när de tas ut efter varje användning enligt anvisningarna som beskrivs under avsnittet om "Desinficering och vätning".

Tvätta alltid händerna och torka dem noga innan du använder linserna. Se till att linsen är fuktig och har varit helt nedsänkt i vätskan. Använd inte linsen om förpackningen inte är förseglad. Kontaktlinser är inte avsedda eller utformade för gemensam användning.

SÄTTA IN LINSEN

1. Kontrollera att linsen inte är ut- och invändig. Placera linsen på pekfingeret och kontrollera formen (fig. 1 & 2).
2. Använd pek- och långfingeret på den andra handen för att hålla det övre ögonlocket öppet. Använd långfingeret intill linsen för att hålla det nedre ögonlocket öppet och placera försiktigt linsen på ögat (fig. 3). Följ samma procedur för det andra ögat.

TA UT LINSEN

Titta uppåt och håll det nedre ögonlocket nere. Skjut försiktigt linsen mot den vita delen av ögat, varefter linsen kan tas ut ur ögat genom att försiktigt klämma linsen mellan tummen och pekfingeret (fig. 4). Följ samma procedur för det andra ögat.

DESINFICERING OCH VÄTNING

Rengör och desinficera kontaktlinserna enligt anvisningarna i den desinfektionslösning som du har fått rekommenderad av din ögonvårdspersonal.

OM KONTAKTLINSER TORKAR UT

Fukta linserna med linsvätska för desinficering, varefter föregående steg kan följas enligt beskrivningen i "Desinficering och vätning".

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. Dessa kontaktlinser är utformade för att bytas ut regelbundet, din ögonvårdspersonal ger rekommendationer om när kontakterna ska bytas ut. Avvik inte från dessa rekommendationer och rådgör med din ögonvårdspersonal om du är osäker.
2. Efter användning ska du alltid rengöra och desinficera dina kontaktlinser enligt anvisningarna.
3. Om dina ögon blir röda, irriterade eller börjar göra ont ska du omedelbart ta ut kontaktlinserna och kontakta din ögonvårdspersonal.
4. Undvik situationer där dina kontaktlinser kan bli nedsmutsade av smink, aerosoler från sprayer eller giftiga ångor.
5. Byt omedelbart ut smutsiga, skadade eller trasiga kontaktlinser.
6. Undvik långa naglar, de kan innehålla bakterier som kan skada både ögat och kontaktlinserna.
7. Förvara kontaktlinserna utom räckhåll för barn.
8. Kontaktlinser är endast säkra för vattensporter när välsittande skyddsglasögon används.
9. Förvaras i rumstemperatur.

AVSEDD ANVÄNDNING

Mjuka kontaktlinser är avsedda för daglig användning för att korrigera synen.

KONTRAINDIKATIONER

Ta omedelbart ut kontaktlinserna och kontakta din ögonvårdspersonal vid: överkänslighet mot kontaktlinserna, ljuskänslighet, röda ögon, överdriven ögonrötthet, sveda i ögonen, nedsatt syn, flytningar från ögonen och om du observerar halos runt föremål eller ljuskällor.

HÅRDA GASPERMEABLA LINSER

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

VARNINGAR

1. Det är av yttersta vikt att din ögonvårdspersonal kontrollerar dina ögon och utformningen av dina kontaktlinser minst var sjätte månad.
2. Endast för personligt bruk.
3. Sov inte med dina kontaktlinser om inte din ögonvårdspersonal säger att du kan göra det på ett säkert sätt.
4. Bär inte kontaktlinserna längre än vad som rekommenderas av din ögonvårdspersonal.
5. Använd aldrig hushållsrengöringsmedel eller tvättmedel på dina kontaktlinser.
6. Använd inte ögondroppar när du använder dina kontaktlinser om inte annat rekommenderas av din ögonvårdspersonal.
7. Använd inte saliv för att fukta eller sätta in dina kontaktlinser.
8. Skölj inte dina kontaktlinser eller linsfodralet med kranvatten.
9. Linserna levereras i speciella linshållare som är fyllda med en vätskelösning för kontaktlinser. Kontaktlinserna måste rengöras och desinficeras när de tas ut efter varje användning enligt anvisningarna som beskrivs under avsnittet om "Underhåll".

INNEHÅLL

En eller flera hårda gaspermeabla kontaktlinser i Hydrosoft+ vätska. Innehåller konserveringsmedlet PHBM 0,0001%. Dessa linser är avsedda för daglig användning. Linserna levereras i speciella linshållare som är fyllda med vätska. Efter öppnandet av linshållaren är denna vätska hållbar i två månader. Omedelbart efter användning och borttagning av linserna måste rengöring av linserna utföras enligt beskrivningen under "Underhåll".

INSÄTTNING OCH UTTAGNING AV KONTAKTLINSER / TIDER FÖR ANVÄNDNING

Följ din ögonvårdspersonals anvisningar.

UNDERHÅLL

Rengör kontaktlinserna dagligen med en rengöringslösning för gaspermeabla linser. Se alltid till att följa den rengörings- och underhållsrutin som rekommenderas av din ögonvårdspersonal. Förvara alltid dina linser i ett slutet förvaringsetui med färsk kontaktlinsvätska och uppdatera vätskan dagligen. Kontaktlinser ska aldrig förvaras i kranvatten och de ska inte heller sköljas med kranvatten. Kranvatten innehåller mikroorganismer som kan fastna på linserna och ge upphov till ögoninfektioner - som obehandlade kan leda till permanent synförlust.

KONTRAINDIKATIONER

Ta omedelbart ut kontaktlinserna och kontakta din ögonvårdspersonal vid: överkänslighet mot kontaktlinserna, ljuskänslighet, röda ögon, överdriven ögonrötthet, sveda i ögonen, nedsatt syn, flytningar från ögonen och om du observerar halos runt föremål eller ljuskällor.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Undvik kontakt med smink eller sprayer. Linserna ska tas ut omedelbart efter kontakt med skadliga ångor, till kemiska eller farliga ämnen, eller farliga miljöer med okulär påverkan.

Byt alltid ut förorenade, skadade eller trasiga kontaktlinser omedelbart.

Undvik långa naglar under vilka det kan finnas bakterier och avlagringar som kan skada både ögat och kontaktlinsen.

Förvara alltid kontaktlinser utom räckhåll för barn.

Simning med kontaktlinser innebär en ökad risk för mikrobiologisk infektion i ögonen. Använd alltid lämpliga simglasögon om du bär kontaktlinser när du simmar.

Förvaras i rumstemperatur.

AVSEDD ANVÄNDNING

RGP linser är avsedda för daglig användning för korrigering av synen. Ortho-K-linser är utformade för att bäras när man sover och tas ut under dagen.

LÅNGVARIG FÖRVARING AV KONTAKTLINSENA

Rengör linserna enligt rekommendation från din ögonvårdspersonal. Torka av med en ludd-fri trasa och lägg linserna i ett torrt och rent förvaringsetui och stäng etuiet ordentligt. Rengör kontaktlinserna och låt dem ligga i fodralet i minst 2 timmar före användning.